

## PRODUKT INFORMATIE

### Veiligheid en Stabiliteit

De FellowRoll TOUR is een stabiele rollator, waardoor de gebruiker zich weer zeker voelt en makkelijker het evenwicht kan bewaren.

### Correcte loophouding

De gebruiker krijgt door de speciale constructie en de naar voren gerichte handgrepen een correcte houding en loopt met de FellowRoll TOUR meer in de rollator. Hierdoor worden de onderarmen, polsen en rug ontlast.

### Loopruimte

De TOUR is aan de achterkant iets breder, voor meer loopruimte voor de gebruiker.

### Zitting

De TOUR heeft een kunststof zitting van polyurethaan, waardoor men veilig en comfortabel kan zitten.

### Remmen

Door de stand van de remhandels werken de remmen optimaal met een minimum aan spierkracht.

### Remkabels

Roestvrijstalen remkabels. Hierdoor blijven de kabels soepel bewegen.

### Bagagerek

Stevig en ruim rek met opstaande randen.

### Het frame

Het frame is gemaakt van lichtgewicht staal en is behandeld met een polyester poedercoating.

### Voorvorken

De TOUR is uitgevoerd met gelagerde voorvorken. Hierdoor is de rollator prettig wendbaar.

### Wielen

De velgen zijn gemaakt van Polypropyleen en voorzien van onderhoudsvrije lagers. Hierdoor blijven de wielen soepel draaien.

### Verkrijgbare opties:

veiligheidstas, boodschappenmand, bagagenetje, dienblad, stokhouder drempelhulp.

### Verkrijgbare aanpassingen:

Hemi rollator met éénhandbediening en/of duwbeugel. Vertragsremmen.

## SPECIFICATIES

FELLOWROLL TOUR Artikel nr: 88800

FELLOWROLL TOUR AF-AS Artikel nr: 88800-AF-AS  
Rollator, met laser en akoestisch signaal.

afstelling minimale hoogte: 77 cm.

afstellen maximale hoogte: 95 cm.

formaat ingeklapt: 86 x 63 x 29 cm.

gewicht rollator: 8.1 kg.

hoogte zitting: 59 cm.

formaat zitting: 40 x 15 cm.

ruimte tussen achterwielen: 56 cm.

formaat wielen: 195 x 44 mm.

max. gebruikersgewicht: 150 kg.

geschikt voor gebruikerslengte van 155-178 cm.



art.nr. 88800 AF-AS FELLOWROLL TOUR AF-AS - Afmetingen en Gewicht									
Min	Max	maten in millimeters				gewicht	L x B x H	gebruiker	
770	950	590	560	440	690	195x44	8,1	860x630x295	165-178 cm

De FELLOWROLL TOUR AF-AS Parkinson rollator is een goedgekeurd loophulpmiddel en geschikt voor gebruik tot 150 kg.

De TOUR alleen als rollator gebruiken!  
De rollator ALTIJD op de parkeerrem zetten voordat u op de zitting plaats neemt.



voor meer informatie:

[parkinsonrollator.nl](http://parkinsonrollator.nl)

FELLOWROLL Mobility Products  
Zuidergracht 41-43, 3763 LS Soest, NL  
tel: 035 609 06 10  
info@fellowroll.nl - www.fellowroll.nl

# FELLOWROLL<sup>®</sup> TOUR AF-AS

PARKINSON ROLLATOR  
met laserlijn en akoestisch signaal



De FELLOWROLL TOUR AF-AS is een kwaliteitsproduct  
Ontworpen voor binnen- en buitengebruik.  
Gebruiksvriendelijk, veilig en prettig in gebruik,  
Comfortabel en eenvoudig te bedienen.

FELLOWROLL TOUR AF-AS

## AFSTELLEN HANDGREPEN

### Afstellen handgrepen

De beide vleugelmoeren iets losdraaien, zodat de afstelstangen te verschuiven zijn.

Kies de juiste hoogte instelling door achter de rollator te gaan staan en de handgrepen zo ver omhoog te schuiven, dat de armen slechts een lichte knik maken. De vleugelmoer van de handgrepen hierna weer stevig aandraaien.



### De Handgrepen

De ergonomische handgrepen zijn in voorwaarts-open richting geplaatst en anatomisch naar de hand gevormd, voorzien van een anti sliplaag.

Hierdoor krijgt u de correcte loophouding, een uitstekende ondersteuning en grip.

De handgrepen geven de gebruiker een comfortabele ondersteuning aan de handpalm en zorgen voor een juiste verdeling van het lichaamsgewicht tijdens het lopen, opstaan of het gaan zitten.

### De remmen

Voor het bedienen van de handremmen heeft u slechts een minimale krachtsinspanning nodig. De handrem slechts lichtjes inknijpen om af te remmen.

### De parkeerrem

De remhandels naar beneden duwen om de TOUR rollator veilig op de handrem te zetten. De wielen worden hierdoor geblokkeerd.

De remhandels omhoog halen om de rollator van de handrem af te zetten.


Voordat u gaan zitten, eerst op de parkeerrem zetten!

### De remdruk afstellen

Bij levering is de rem reeds correct ingesteld. U kunt desgewenst de remdruk bijstellen.

Om de remdruk bij te stellen ga dan als volgt te werk:

De twee borgmoertjes onderaan de remkabel losdraaien. De stelbus omhoog draaien voor meer remkracht, of omlaag voor minder remkracht. Indien u de juiste stand van de rem heeft gevonden, de borgmoertjes van de stelbus hierna weer vastdraaien.

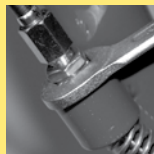

## IN- EN UITKLAPBAAR

### Geheel opklapbaar

De FellowRoll TOUR is met een eenvoudige handeling veilig in- en uitklapbaar.

### Inklappen

De FellowRoll TOUR is uitgerust met een extra veilige inklap vergrendeling.

Om de TOUR uit de vergrendeling te halen gaat u als volgt te werk:

Wip het rode handeltje aan de linkerkant van de opklapbeugel omhoog. Hierdoor komt de rollator uit de vergrendeling.



Vervolgens de opklapbeugel omhoog halen. De rollator klapt nu in.

### Uitklappen

Zorg allereerst dat de rollator met vier wielen op de grond staat. Druk vervolgens de inklapbeugel omlaag drukken. De rollator valt automatisch weer in de vergrendeling. De TOUR is nu klaar voor gebruik.

## SLEEPREMMEN

Als optie is het mogelijk om sleepremmen/vertragsremmen aan te brengen.

Deze vertragsremmen zorgen ervoor dat de snelheid van de rollator kan wordengereduceerd.




*Instructie voor de montage van de extra sleepremmen:*

De sleepremmen zijn links en rechts gelijk.

Schuif de sleeprem over de remhevel.

Stelbout van de remhevel goed aandraaien. (1)

De druk van de sleepremmen afstellen. (2)

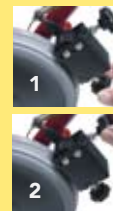

## WERKING TOUR AF-AS

DE FELLOWROLL TOUR AF-AS PARKINSON IS UITGEVOERD MET LASERUNIT & AKOESTISCH SIGNAAL

**AF-AS**

Om de AF-AS module te activeren, drukt u op de rode knop van de rechter handgreep. Hiermee wordt de laserlijn en/of metronoom geactiveerd.

De laser projecteert een rode lijn op de grond tussen de achterwielen. De gebruiker wordt hierdoor uitgenodigd om te gaan lopen.

Wanneer u zich op deze lijn richt en daar vervolgens overheen stapt, is het 'freezing moment' voorbij.

De timer voor de laserlijn- en/of akoestisch signaal is ingesteld op 10-12 seconden. Het proces herhaalt zich, door nogmaals op de knop te drukken.

De laserlijn en het akoestisch signaal kunnen onafhankelijk van elkaar aan- of uitgeschakeld worden d.m.v. de witte drukknopjes op de module in- of uit te schakelen.

De AF-AS module met de laserunit en akoestisch signaal is onder de zitting van de TOUR rollator geplaatst.



Indien de batterijen vervangen moeten worden, schuift u het klepje van de batterijklep uit de vergrendeling.

Nadat u de batterijen heeft vervangen het klepje weer goed dichtschuiven.

De AF-AS uitvoering werkt op 2x AA batterijen.

Zorg bij vervanging voor batterijen van goede kwaliteit.

