

PRODUKT INFORMATIE

Veiligheid en Stabiliteit

De FellowRoll SOLO RA AF-AS is een stabiele Parkinson armschaal rollator voor binnen- en buitengebruik. De armschalen zijn in elke horizontale stand te verstellen. De afstelstangen zijn traploos in hoogte te verstellen en kunnen zowel naar binnen als buiten gedraaid worden. De SOLO is dmv de rode trekband, onder de zitting, eenvoudig inklapbaar te maken en eenvoudig te vervoeren.

Loopruimte

De SOLO is aan de achterkant breder, voor meer loopruimte voor de gebruiker.

Zitting

De SOLO heeft een stevige kunststof zitting waardoor men veilig en comfortabel kan zitten.

Remmen

De armschalen en remhandels kunnen in diverse posities ingesteld worden zodat de handen- en polsen de juiste stand krijgen.

Remkabels

Roestvrijstalen remkabels. Hierdoor blijven de kabels soepel bewegen.

Bagagerek

Stevig en ruim bagagerek.

Het frame

Het frame is gemaakt van lichtgewicht staal en is behandeld met een polyester poedercoating.

Voorvorken

De SOLO is uitgevoerd met gelagerde voorvorken. Hierdoor is de rollator prettig wendbaar.

Wielen

De velgen zijn gemaakt van Polypropyleen en voorzien van onderhoudsvrije lagers. Hierdoor blijven de wielen soepel draaien.

Verkrijgbare opties:

Vertragingssremmen.



voor meer informatie:
parkinsonrollator.nl

SPECIFICATIES

Technische gegevens

Afmetingen SOLO RA AF-AS:

Lengte:	75 cm
Breedte:	67 cm
Hoogte:	104-122 cm
Gewicht:	11,5 kg
Zithoogte:	62 cm
Max. gebruikersgewicht:	125 kg

Afmetingen, ingeklapt:

Lengte:	75 cm
Breedte:	25 cm
Hoogte:	100 cm
Kleur:	Indian Red
art.nr.:	77767
Art.nr. vertragingssremmen	77034



FELLOWROLL® SOLO RA AF-AS

**PARKINSON
ARMSCHAAL ROLLATOR**
met laserlijn en akoestisch signaal

De FELLOWROLL SOLO RA AF-AS is een kwaliteitsproduct
Ontworpen voor binnen- en buitengebruik.

Gebruiksvriendelijk, veilig en prettig in gebruik,
Inklapbaar, comfortabel en eenvoudig te bedienen.

FELLOWROLL SOLO RA AF-AS

FELLOWROLL mobility Products
info@fellowroll.nl - www.fellowroll.nl

AFSTELLEN HANDGREPEN

Afstellen handgrepen

De beide vleugelmoeren iets losdraaien, zodat de afstelstangen in de juiste positie verschuiven zijn.

Kies de juiste hoogte instelling door achter de rollator te gaan staan en de afstelstangen omhoog te schuiven. De vleugelmoer van de handgrepen hierna weer stevig aandraaien.

De Handgrepen

De handgrepen kunnen in diverse posities ingesteld worden en zijn anatomisch naar de hand gevormd en voorzien van een anti sliplaag.

De Armschalen

De armschalen kunnen tevens in diverse posities ingesteld worden op wens van de gebruiker. De armschalen geven de gebruiker een comfortabele ondersteuning aan de armen en zorgen voor een juiste verdeling van het lichaamsgewicht tijdens het lopen.

De remmen

Voor het bedienen van de handremmen heeft u slechts een minimale krachtsinspanning nodig.

De parkeerrem

De remhandels naar voren duwen om de SOLO rollator veilig op de parkeerrem te zetten. De wielen worden hierdoor geblokkeerd.

De remhandels naar u toe halen om de rollator van de parkeerrem af te zetten.

Voordat u gaan zitten, eerst op de parkeerrem zetten!

De remdruk afstellen

Bij levering is de rem reeds correct ingesteld. U kunt desgewenst de remdruk bijstellen.

Om de remdruk bij te stellen ga dan als volgt te werk: De twee borgmoertjes onderaan de remkabel losdraaien. De stelbus omhoog draaien voor meer remkracht, of omlaag voor minder remkracht. Indien u de juiste stand van de rem heeft gevonden, de borgmoertjes van de stelbus hierna weer vastdraaien.

IN- EN UITKLAPBAAR

Geheel opklapbaar

De FellowRoll SOLO RA is met een eenvoudige handeling veilig in- en uitklapbaar.

Inklappen

De FellowRoll SOLO is uitgerust met een veilige inklap vergrendeling.

Om de SOLO uit de vergrendeling te halen gaat u als volgt te werk:

Trek aan het rode handeltje aan de linkerachterkant van de zitting. Hierdoor komt de rollator uit de vergrendeling en kan de rollator ingevouwen worden door de beide framedelen naar elkaar toe te drukken.

Uitklappen

Zorg dat de rollator met vier wielen op de grond staat. Trek beide kanten van het frame naar buiten. Duw vervolgens de zitting in de vergrendeling. De rollator valt automatisch weer in de vergrendeling. De SOLO is nu weer klaar voor gebruik.

VERTRAGINGSREMMEN

Als optie is het mogelijk om sleepremmen/vertragsremmen op de achterwielen aan te brengen.



Deze vertragsremmen zorgen ervoor dat de snelheid van de rollator kan worden gereduceerd.

Art.nr. Vertragsremmen: 77034.

Afstellen van de extra sleepremmen:

De druk op het wiel kan met de draaiknop bovenop de sleepremmen afgesteld worden. (1)



WERKING SOLO AF-AS

DE SOLO RA AF-AS PARKINSON IS UITGEVOERD MET LASERUNIT & AKOESTISCH SIGNAAL

AF-AS

Om de AF-AS module te activeren, drukt u op de rode knop van de rechter handgreep. Hiermee wordt de laserlijn en/of metronoom geactiveerd.



De laser projecteert een rode lijn op de grond tussen de achterwielen. De gebruiker wordt hierdoor uitgenodigd om te gaan lopen.


Wanneer u zich op deze lijn richt en daar vervolgens overheen stapt, is het 'freezing moment' voorbij.

De timer voor de laserlijn- en/of akoestisch signaal is ingesteld op 10-12 seconden. Het proces herhaalt zich, door nogmaals op de knop te drukken.

De laserlijn en het akoestisch signaal kunnen onafhankelijk van elkaar aan- of uitgeschakeld worden d.m.v. de witte drukknopjes op de module in- of uit te schakelen.

De AF-AS module met de laserunit en akoestisch signaal is onder de zitting van de SOLO rollator geplaatst.

Indien de batterijen vervangen

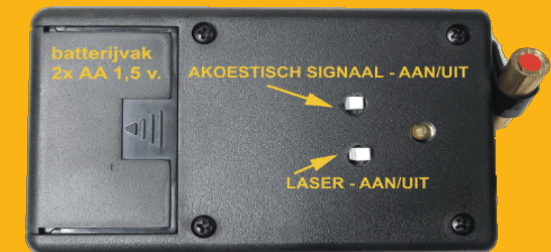

moeten worden, schuift u het klepje van batterijvakje uit de vergrendeling.

Nadat u de batterijen heeft vervangen het klepje weer goed dichtschuiven.

De AF-AS uitvoering werkt op 2x AA batterijen.

Zorg bij vervanging voor batterijen van goede kwaliteit.

